

## Használati útmutató:

- ☞ Húzza fel az ujjára a mosható fogkefét
- ☞ Első használat esetén forró vízzel mossa ki
- ☞ Hagyja megszáradni
- ☞ A végét nedvesítse be
- ☞ Helyezzen kis mennyiséget az újra felhúzható fogkefére
- ☞ Körkörös mozdulatokkal, ahogy mi is magunknak, tisztítsa meg kedvence fogait
- ☞ Fogkő megelőzésére heti egyszeri használat javasolt
- ☞ A már kialakult fogkő esetén akár naponta is használja
- ☞ Ha elszakadt, elkopott, szerezzen be új fogkefét